


## Комплектация изделия

Прибор аналоговый	1 шт.	
Элемент питания (батарея)	3 шт.	
Ушные вкладыши	3 шт.	
Щетка для чистки прибора	1 шт.	
<b>Тех. параметры</b>	<b>КА - 2</b>	<b>КА - 2Т</b>
Доп. функции	----	режимы Н / L
OSP L90	130dB±4dB	
Макс. усиление	38dB	
Частота	450Hz~3800Hz	
Потреб-ый ток	4 мА	
Тип батареи	1,5V AG13/LR44/L1154	
Вес прибора	9 гр.	7 гр.

**Подключение прибора**  
Подготовьте пожалуйста прибор к работе согласно инструкции.

1. При первом включении, перед использованием прибора убедитесь, в том, что прибор выключен и регулятор громкости находится в минимальном положении.

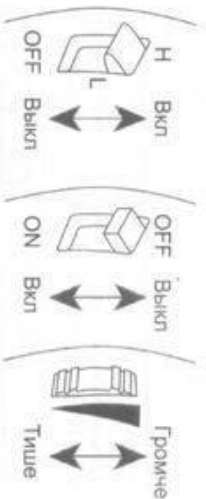

## Модель КА - 2


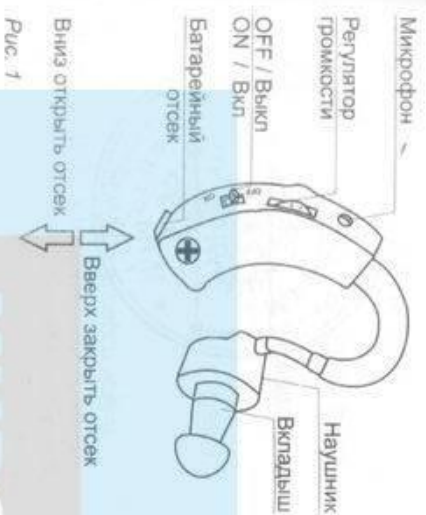


Рис. 1

2. Аккуратно откройте батарейный отсек, вставьте батарею в прибор, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек. Используйте батарею 1,5V формата AG13/LR44/L1154 или аналог.

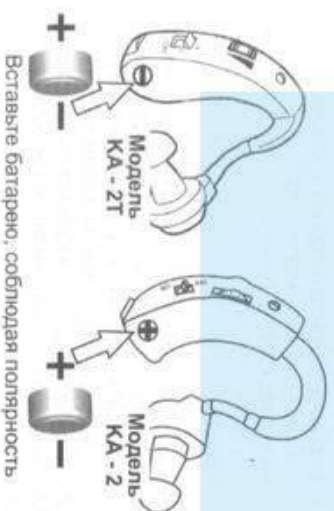

## Модель КА - 2Т

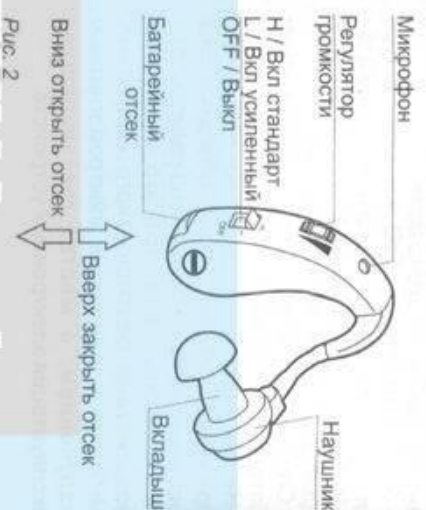


Рис. 2

3. Включите прибор, для этого установите выключатель в положение ON.

4. Переведите регулятор громкости в минимальное положение.

5. Разместите наушник в слуховом проходе.



6. Далее регулятором плавно настройте комфортную для вас громкость. Практикуйтесь с регулировкой громкости, настройте прибор для себя и определите оптимальное положение регулятора громкости.

# МИР СЛУХА.рф

Для правильной работы прибора, используйте вкладыш подходящий вам по размеру.

Для транспортировки и сохранности прибора используйте пластиковый бокс. При этом не помещайте в бокс вместе с прибором посторонние предметы. Рекомендуем выключать прибор после каждого использования, это продлит срок службы батареи.

При длительном хранении вынимайте батарею из прибора, некоторые виды батарей со временем начинают выделять химические элементы, которые могут повредить прибор.

При использовании прибора учитывайте окружающую вас звуковую обстановку. На улице, в транспорте, разговаривая по телефону или при просмотре телевизора, вероятно потребуются скорректировать уровень громкости усилителя.

Важное значение имеет, правильное размещение наушника в слуховом проходе. Вкладыш наушника необходимо плотно вставить в слуховой проход, при этом не прилагайте больших усилий размещая наушник в слуховом проходе, это может привести к травме. Извлекайте наушник из слухового прохода аккуратно не спеша, чтобы не травмировать органы слуха.

### Назначение прибора.

Благодаря Вам за приобретение данного устройства. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией, изучение функциональных возможностей прибора, позволит Вам получить наилучший результат и комфорт от его использования.

Прибор изготовлен и предназначен для индивидуального применения в быту, в целях усиления звукового сигнала. Не предназначен для людей с нарушениями и заболеваниями органов слуха. Перед применением прибора рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Прибор прост в обращении, не требует специального программирования, но необходимо учитывать, рекомендации и противопоказания при его эксплуатации.

### Рекомендации

• Увеличивайте громкость постепенно, плавной настройкой регулятора, исходя из окружающей вас звуковой обстановки.

• Выключайте прибор после каждого использования. При длительном хранении вынимайте батарейку из прибора.

• Не используйте прибор во время сна.

### Противопоказания

Δ Не применяйте прибор, если у вас есть повреждения ушного прохода, царапины, ооспадения. Если у вас есть заболевания органов слуха, проконсультируйтесь с врачом перед применением прибора.

Δ Прибор следует хранить в местах не доступных для детей.

Δ Не применяйте прибор в случае его повреждения.

### Требования безопасности

- Не допускайте попадания воды и влаги во внутрь прибора и на его части.

- Эксплуатируйте прибор при температуре от -15С до +40С и влажности не более 80 %.

- Используйте только предназначенные для данного прибора источники питания.

- Соблюдайте полярность при подключении батарейки к прибору.

- Не оставляйте прибор под действием прямых солнечных лучей, обогревателей (на подоконнике, в машине, на радиаторе).

- Не используйте прибор во время воздействия рентгеновского облучения, МРТ, рядом с мощным электромагнитным излучением, в местах где запрещена эксплуатация электронных устройств.

### Уход и обслуживание прибора

Бережное обращение и правильный уход обеспечат качественную работу прибора надолгие годы.

Никогда не мойте прибор и его части под проточной водой. Протирать мягкой и сухой тканью по мере его загрязнения, без использования химических средств.

Регулярно очищайте вкладыши от ушной серы и влаги, не допускайте загрязнения и звукопроводящих каналов. Оберегайте отверстие микрофона от загрязнения и повреждения.

Снимайте прибор во время проведения косметических процедур, не допускайте попадания лака, одеколона, кремов и других составов на поверхность прибора и его части.

### Гарантийный талон на изделие

#### Усилитель звука

КОНТАКТ МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_



Покупатель издалека получил исправное состояние, без внешних повреждений. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

# МИР СЛУХА.рф

### Устранение возможных неисправностей

- Проверьте включение прибора, для этого установите включатель в правильное положение.

- Проверьте правильность и полярность установки элемента питания (батарей).

- Плавно настройте громкость регулятором. Засорился ушной вкладыш, звукопровод. Замените элемент питания (батарей).

- Снизьте громкость, проверьте плотность прилегания вкладыша в слуховом проходе. Не трогайте микрофон при работе прибора.

- Выключайте прибор после использования. Используйте энергосбережение и качественные элементы питания (батарей).

### Условия гарантийного обслуживания:

Обязательна запись о дате продажи, штамп и подпись представителя торгующей организации. Талон дает право на гарантийное обслуживание прибора в течение **12 месяцев** с даты продажи. Средний срок службы прибора 5 лет

Гарантийное обслуживание не распространяется на звукопроводы, элементы питания, ушные вкладыши, бокс для хранения (транспортировки). Гарантийное обслуживание не производится в случае: нарушения условий эксплуатации прибора, механических повреждений, следов воздействия химических веществ, жидкостей, а также в случае самостоятельного ремонта, вскрытия прибора, повреждения защитных пломб (наклеек).

### Корешок к талону

на гарантийное обслуживание

Отметки гарантийной мастерской

ГАРАНТИЯ 1 ГОДА  
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ТОВАР МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НАДДЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И ТОВАР  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ  
КОНТАКТ НЕ ПОДЛЕЖАЕТ