

Комплектация изделия	
Прибор аналоговый	1 шт.
Элемент питания (батарея)	2 шт.
Ушные вкладыши	3 шт.
Щетка для чистки прибора	1 шт.
Тех. параметры	
Доп. функции	---
OSPL90	110dB±5dB
Макс. усиление	30 dB
Частота	300~4000Hz
Потребный ток	4 мА
Тип батареи	1,5V AG3 / A312
Вес прибора	2,7 гр.

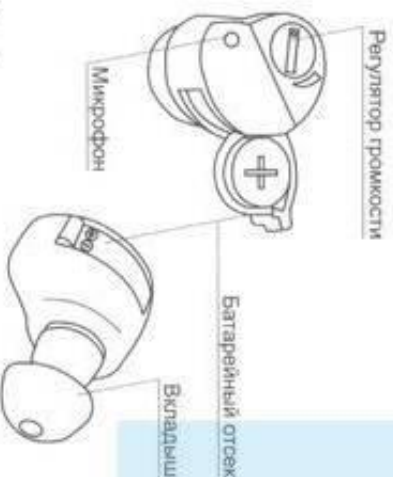


Рис. 1

Модель MINI KA-3

Подключение прибора


Подготовьте пожалуйста прибор к работе согласно инструкции.

1. При первом включении, перед началом использования прибора убедитесь в том, что регулятор громкости находится в минимальном положении.



⚠ Вниматель! Настраивайте громкость плавно.

2. Аккуратно откройте батарейный отсек, вставьте батарею, соблюдая полярность. Включите прибор закрыв батарейный отсек полностью до упора. Используйте батарею 1,5 V формата AG3 A312 или аналог.

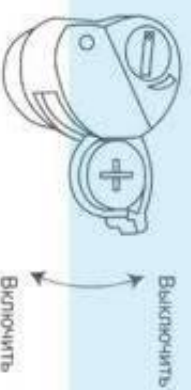

⚠ Выключайте прибор после каждого использования, открыв батарейный отсек

При использовании воздушно-цинковой батареи, снимите защитную наклейку с батареи, подождите 3 минуты, затем вставьте батарею в прибор соблюдая полярность.

3. Разместите прибор в слуховом проходе. Предварительно наденьте на прибор вкладыш подходящий вам по размеру.

Способ размещения прибора в слуховом проходе



МИР СЛУХА.рф

4. Далее регулятором плавно настройте комфортную для себя громкость.

При настройке громкости не закрывайте пальцами микрофон, это может привести к появлению неприятного звона.

Попрактикуйтесь с регулировкой громкости, настройте прибор для себя и определите оптимальное положение регулятора громкости в различных условиях.

Данный прибор не оборудован кнопкой выключения питания. Для выключения прибора откройте батарейный отсек, для включения прибора закройте батарейный отсек.

Хранение прибора осуществляйте с закрытым отсеком без батареи внутри.

Для правильной работы прибора, используйте вкладыш подходящий вам по размеру.

Для транспортировки и сохранности прибора используйте пластиковый бокс. При этом не помещайте в бокс вместе с прибором посторонние предметы.

Рекомендуем выключать прибор после каждого использования, это продлит срок службы батареи. При длительном хранении вынимайте батарею из прибора, батарея со временем начинает выделять элементы, которые могут повредить прибор.

При снижении громкости прибора замените батарею на новую. Снимите и очистите вкладыш отшной серы.

При использовании прибора учитывайте окружающую вас звуковую обстановку. На улице, в транспорте, разговаривая по телефону или при просмотре телевизора, вероятно потребуется скорректировать уровень громкости усилителя.

Важное значение имеет, правильное размещение прибора в слуховом проходе. Прибор с вкладышем необходимо вставить в слуховой проход, при этом не прилагайте больших усилий размещая наушник в слуховом проходе, это может привести к травме.

Извлекайте наушник из слухового прохода аккуратно не спеша, чтобы не травмировать органы слуха.

Назначение прибора.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией, изучение функциональных возможностей прибора, позволит Вам получить наилучший результат и комфорт от его использования.

Прибор изготовлен и предназначен для индивидуального применения в быту, в целях усиления звукового сигнала. Не предназначен для людей с нарушениями и заболеваниями органов слуха. Перед применением прибора рекомендуем проконсультироваться с врачом. Прибор прост в обращении, не требует специального программирования, но необходимо учитывать, рекомендации и противопоказания при его эксплуатации.

Рекомендации

- Увеличивайте громкость постепенно, плавной настройкой регулятора, исходя из окружающей вас звуковой обстановки.
- Выключайте прибор после каждого использования. При длительном хранении вынимайте батарею из прибора.
- Не используйте прибор во время сна.

Противопоказания

- Δ Не применяйте прибор, если у вас есть повреждение ушного прохода, царапины, воспаления. Если у вас есть заболевания органов слуха, проконсультируйтесь с врачом перед применением прибора.
- Δ Прибор следует хранить в местах не доступных для детей.
- Δ Не применяйте прибор в случае его повреждения.

Требования безопасности

- Не допускайте попадания воды и влаги во внутрь прибора и на его части.
- Эксплуатируйте прибор при температуре от -15С до +40С и влажности не более 80 %.
- Используйте только предназначенные для данного прибора источники питания.

- Соблюдайте полярность при подключении батареи к прибору.

- Не оставляйте прибор под действием прямых солнечных лучей, обогревателей (на подоконнике, в машине, на радиаторе).

- Не используйте прибор во время воздействия рентгеновского облучения, МРТ, рядом с мощным электромагнитным излучением, в местах где запрещена эксплуатация электронных устройств.

Уход и обслуживание прибора

Бережное обращение и правильный уход обеспечат качественную работу прибора на долгие годы.

Никогда не мойте прибор и его части под проточной водой. Протрите мягкой и сухой тканью по мере его загрязнения, без использования химических средств.

Регулярно очищайте вкладыши от ушной серы и влаги, не допускайте загрязнения и звукопроводящих каналов. Оберегайте отверстие микрофона от загрязнения и повреждения.

Снимайте прибор во время проведения косметических процедур, не допускайте попадания лака, одеколона, кремов и других составов на поверхность прибора и его части.

Гарантийный талон на изделие

Усилитель звука



КОНТАКТ МОДЕЛЬ _____

Дата продаж _____

Продавец _____

Покупатель *использует* изделие в исправном состоянии, без внешних повреждений. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Устранение возможных неисправностей

Отсутствует слышимость.

- Проверьте включение прибора, для этого установите включатель в правильное положение.
- Проверьте правильность и полярность установочного питания (батареи).

Слабая слышимость, треск, зум.

- Плавно настройте громкость регулятором.
- Засорился ушной вкладыш, звукопровод.
- Замените элемент питания (батарею).

Слышен свист.

- Снизьте громкость, проверьте плотность прилегания вкладыша в слуховом проходе.
- Не трогайте микрофон при работе прибора.

Быстро разряжается батарея.

- Выключайте прибор после использования.
- Используйте энергоемкие и качественные элементы питания (батареи).

Условия гарантийного обслуживания:

Обязательна запись о дате продажи, штам и подпись представителя торгующей организации. Талон дает право на гарантийное обслуживание прибора в течение **12 месяцев** с даты продажи. Средний срок службы прибора 5 лет

Гарантийное обслуживание не распространяется на звукопроводы, элементы питания, ушные вкладыши, бокс для хранения (транспортировки) Гарантийное обслуживание не производится в случае: нарушения условий эксплуатации прибора, механических повреждений, следов воздействия химических веществ, жидкостей, а также в случае самостоятельного ремонта, вскрытия прибора, повреждения защитных пломб (наклеек).

Корешок к талону

на гарантийное обслуживание

Отметки гарантийной мастерской

ГАРАНТИЯ 1 ГОД
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

КОНТАКТ

